

ProKin

Informazioni di sicurezza e prestazione

Specifiche Tecniche

Dimensioni	160 x 110 x 200 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
Peso	230 Kg
Misurazione carichi	150 Kg
Alimentazione	230-240 VAC, 50 Hz
Potenza assorbita	600 W
Livelli instabilità pedana	50 (PK252) 20 (PK212)

Funzionalità

- Valutazione e training equilibrio ortostatico dinamico/statico
- Valutazione e training della gestione del trasferimento del peso corporeo in posizione bipodalica
- Valutazione e training delle capacità cognitive e sensomotorie degli arti inferiori
- Biofeedback del senso di posizione e del senso del movimento

Utilizzazione nel trattamento in ambito ortopedico (fase post-acuta ove effettuabile e/o percorribile):

- Protesizzazione anca
- Protesizzazione ginocchio
- Protesi di caviglia
- Ricostruzioni legamentose (spalle, anche, ginocchia, caviglie)
- Instabilità e lassità legamentosa (spalle, anche, ginocchia, caviglie)
- Riabilitazioni tendinee di differente entità
- Problematiche del rachide
- Problematiche di natura degenerativa
- Tendine rotuleo
- Recupero tonico
- Trofismo dinamico

ProKin

Utilizzazione nel trattamento in ambito neurologico (fase post-acuta ove effettuabile e/o percorribile):

- Recupero della motricità fine dell'arto inferiore a carico controllato
- Ictus
- Emiplegia
- Atassia
- Sclerosi Multipla (SM)
- Disturbi del controllo motorio cinestesico
- Paraparesi (Spine Core Injure)
- Parkinson (PD)
- Problematiche di natura degenerativa

Utilizzazione aggiuntiva per l'utente normotipo (utilizzo non medicale):

- Test e training riguardanti la postura, l'allenamento funzionale e l'allenamento health fitness;
- Test e training per il mantenimento e l'incremento della performance;
- Test e training per la prevenzione e programmazione di attività fisica adattata.

Controindicazioni

Controindicazioni assolute (la loro presenza deve essere esclusa prima dell'uso del dispositivo)

- Infarto miocardico acuto (negli ultimi 2 giorni)
- Angina pectoris instabile
- Aritmia cardiaca e/o emodinamica limitata
- Stenosi aortica massiva sintomatica
- Insufficienza cardiaca non compensata/non controllata
- Embolia polmonare acuta o infarto polmonare
- Miocardite, pericardite, endocardite acuta
- Dissezione acuta dell'aorta

ProKin

- Sindrome coronarica acuta
- Flebotrombosi acuta delle estremità inferiori
- Infezioni febbrili
- Trombosi acuta
- Ferite recenti, ad es. dopo un intervento chirurgico (chirurgia generale)
- Frattura acuta
- Emicrania acuta

Controindicazioni relative (l'attività può essere iniziata se i possibili benefici superano i rischi. La decisione deve essere presa dal medico prima dell'uso del device)

- Stenosi della coronaria principale sinistra
- Malattia dell'arteria principale
- Malattia di una valvola cardiaca, di gravità moderata
- Squilibrio elettrolitico accertato
- Ipertonia arteriosa (RR > 200 mmHg sist. > 110 mmHg diast.)
- Tachiaritmia o bradiaritmia
- Cardiomiopatia ipertrofica e altre forme di ostruzione del tratto di efflusso
- Blocco atrioventricolare (AV) di grado più elevato
- Anemia
- Disturbi fisici e/o mentali che causino incapacità di svolgere esercizio fisico in modo adeguato
- Dispositivi medici parzialmente invasivi (sonde, infusori, cateteri, fissatori esterni ecc.)
- Pacemaker cardiaco
- Disabilità visiva (visione < 30% secondo OMS)
- Gravidanza
- Disco danneggiato o malattia traumatica della colonna vertebrale
- Infiammazioni
- Epilessia